

ICE COMPRESSION

GUIDE D'UTILISATION ATTELLE ÉPAULE : IC200L

IMPORTANT

Lisez l'intégralité de ce guide d'utilisation, y compris tous les avertissements, contre-indications et mises en garde avant d'utiliser votre attelle Ice Compression.

Ne pas suivre les instructions suivantes peut entraîner des blessures corporelles.

Les systèmes ICE COMPRESSION FIRST, ICE COMPRESSION DUO et MOOVE combinent les thérapies par le froid et par la compression. Ils sont destinés à traiter les soins post-chirurgicaux et les traumatismes aigus afin de réduire l'œdème et la douleur. Ils sont destinés à être utilisés par/sur ordre de professionnels de la santé agréés dans les établissements de santé, les établissements d'entraînement sportif ou prestataires à domicile.

Hauteur	: 48 cm
Circonférence buste	: 68 cm
Circonférence épaule	: 37 cm
Circonférence bras	: 38 cm

APPLICATION DE L'ATTELLE

Utilisable avec les systèmes suivants : ICE COMPRESSION FIRST, DUO et MOOVE




1 – Placez l'attelle sur l'épaule à traiter en veillant à ce que les connecteurs soient vers le bas.



2 – Attachez la première sangle au niveau du bras et la deuxième au niveau du thorax. Passez la sangle la plus grande sous le bras opposé puis rabattez là sur l'épaule à traiter.
Veillez à ce que l'attelle soit correctement ajustée. Attention à ne pas trop serrer au risque de causer des douleurs.

3 – Vous pouvez ajouter une sangle au niveau de l'avant bras pour un meilleur maintien et confort

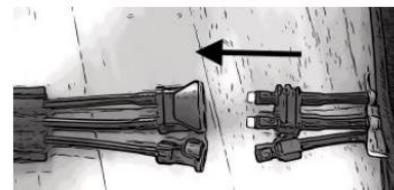

4 – Assemblez les connecteurs de l'attelle à ceux de la rallonge allant à la machine. Les connecteurs doubles (circuit eau) ensemble et les connecteurs simples (circuit air) ensemble.
Vous devez entendre un « clic » pour chacune des connexions.

5 - Vous pouvez alors allumer la machine, sélectionner l'attelle que vous venez de connecter et choisir le programme désiré. 1



NETTOYAGE DE L'ATTELLE ÉPAULE

1. Posez votre attelle sur une surface plane avec le côté contenant le logo tourné vers le haut. Ouvrez la housse sur le côté et retirez la poche se trouvant à l'intérieur de la housse en faisant attention aux connecteurs. Laissez sécher et le poser dans un endroit propre et sec.
2. Essuyez l'intérieur de l'attelle avec un désinfectant de surface entre chaque utilisation.
3. Pour l'entretien, retourner la housse à l'envers. La laver à la machine en mode fragile ou à la main avec de l'eau froide et un antibactérien ou un détergent doux. N'utilisez pas d'eau de javel. Suspendre la housse pour la laisser sécher à distance de toute source de chaleur.

RANGEMENT DE L'ATTELLE ÉPAULE

1. Ne pliez pas votre attelle. Le pliage, la flexion excessive ou l'empilement d'objets sur votre attelle peuvent l'empêcher de fonctionner correctement.
2. Lorsque vous ne l'utilisez pas, posez votre attelle à plat ou suspendez-la à l'aide de la petite boucle de suspension noire qui se trouve tout en haut.

INFORMATIONS GÉNÉRALES



ATTENTION

Suivez les recommandations d'un professionnel de santé concernant l'utilisation de cet appareil. La durée du traitement et la fréquence d'utilisation sont variables d'une personne à l'autre.

L'attelle cuisse ICE COMPRESSION utilise de l'eau en circulation à une température de congélation. Une utilisation inappropriée ou prolongée peut endommager les tissus.

Au cours du traitement, la peau entourant la région traitée doit être surveillée. Observez les signes de brûlure, de démanchement, d'enflure accru ou de douleur dans le membre traité. En cas de modification de la couleur de la peau (assombrissement, rougeur excessive, aspect marbré) ou de présence de cloques sur la jambe traitée, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin.

Pendant la période postopératoire immédiate, redoublez de prudence. Les personnes sous sédation ou sous tout médicament peuvent avoir une sensation de douleur altérée.

Les attelles de compression de glace ne sont pas fournies stériles. Ne pas appliquer directement sur la peau. Utilisez toujours une couche de vêtements entre la peau et l'appareil. Ne pas utiliser si la zone traitée présente une éruption cutanée, une infection ou une plaie ouverte.

Passez en revue toutes les contre-indications ci-jointes avant d'utiliser l'appareil.

A utiliser avec précaution. Peut causer de graves brûlures. Ne pas utiliser sur les zones sensibles de la peau. L'utilisation sans surveillance de l'appareil par des enfants ou des personnes inaptes peut être dangereuse.

Tout incident GRAVE ou risque d'incident GRAVE doit être signalé sans délai à l'ANSM ou au fabricant.

INFORMATIONS CONCERNANT LA GARANTIE

Housse : en cas de défaut du fabricant, la housse peut être retournée dans les 10 jours qui suivent l'achat.

Poche (se trouve à l'intérieur de la housse) : garantie 1 an.

Notes d'utilisateur

Lors de l'utilisation, assurez-vous que le tuyau des connecteurs ne forme pas de coudes ou de plis qui pourraient entraver l'écoulement de l'eau. Évitez d'empiler des objets sur l'attelle à tout moment, surtout lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Les attelles sont disponibles en plusieurs tailles et sous différentes formes. Chacune d'entre elles est uniquement destinée à l'usage auquel elle est prévue. Par exemple, l'attelle de poignet n'est pas conçue pour être utilisée sur les orteils et l'attelle de dos n'est pas conçue pour être utilisée dans la région de la hanche.

Pour éviter un incendie ou d'autres dangers, n'utilisez pas d'attelle d'autres fabricants avec la machine Ice Compression que vous avez.

Conditions de stockage

Les attelles doivent être conservées à l'abri de la lumière et du soleil dans des conditions de température comprise entre 10 et 30 °C. Sinon, **détérioration des soudures et risques de fuites.**

CONTRE INDICATIONS

La thérapie par compression est contre-indiquée pour :

- les patients atteints de phlébite sévère dans la partie du corps à traiter
- les patients ayant des antécédents ou étant prédisposés à un diagnostic de thrombose veineuse sévère ou d'embolie pulmonaire dans la partie du corps à traiter. Il en est de même pour les patients pour qui il a été prescrit un repos médical prolongé.
- les patients atteints d'une artériosclérose importante ou de tout autre trouble cardiovasculaire dans la partie du corps à traiter
- les patients dont la partie du corps à traiter a un flux sanguin, lymphatique ou veineux sensible (cela peut être le cas avec le cancer)
- les patients souffrant d'insuffisance cardiaque
- les patients présentant des facteurs de risque significatifs ou des signes cliniques d'embolie (embolie pulmonaire, infarctus cérébral, fibrillation, endocardite, infarctus du myocarde ou plaque athéroscléreuse embolique)
- Les patients présentant une hypertension décompensée dans la zone touchée
- les patients présentant une lésion ouverte dans la zone touchée (la lésion doit être recouverte d'un pansement avant d'utiliser le système ICE COMPRESSION)
- les patients présentant une fracture aiguë instable (non traitée) dans la zone touchée
- les patients de moins de 18 ans (sauf accord du médecin traitant) ou les patients ayant des obstacles à la communication, qu'ils soient temporaires, liés à la drogue ou permanents
- les patients présentant une affection cutanée localisée instable (dermatite, ligature veineuse, gangrène ou greffe de peau récente) dans la zone touchée.

La cryothérapie est contre-indiquée pour :

- les patients souffrant d'insuffisance cardiaque ou d'insuffisance cardiaque congestive (avec œdème associé des membres ou des poumons)
- les patients présentant une affection cutanée localisée instable (dermatite, ligature veineuse, gangrène ou greffe de peau récente) dans la zone touchée
- les patients souffrant d'une insuffisance vasculaire grave au niveau du membre traité
- les patients souffrant d'érysipèle ou d'une autre infection active dans la zone touchée
- les patients souffrant de cryoglobulinémie ou d'hémoglobinurie
- les patients atteints de la maladie de Raynaud ou d'hypersensibilité au froid (urticaire au froid)
- les patients hypersensibles ou patients présentant une pression artérielle extrêmement basse
- les patients diabétiques
- les patients présentant une circulation locale compromise ou une atteinte neurologique (y compris une paralysie ou une atteinte localisée due à de multiples interventions chirurgicales) dans la zone touchée
- les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde dans la zone touchée
- les patients de moins de 18 ans (sauf accord du médecin traitant) ou les patients ayant des obstacles à la communication, qu'ils soient temporaires, liés à la drogue ou permanents

POUR PLUS D'INFORMATIONS

<http://www.easycryo.fr/>

Contactez nous

MKS Paris Easy Cryo
Zone Ecoparc
27 Rue Mezière Christin
34690 Fabrègues

Tel : +33 (0)4 99 64 21 05
Fax : +33 (0)4 99 64 21 06

olivia.beldame@easycryo.fr

