


TENS ECO 2

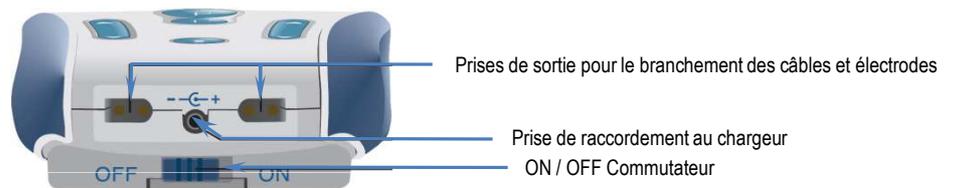

Mise en marche de l'appareil

- Mettre le commutateur sur **ON**
- Appuyer sur la touche



Mise en route de la stimulation

- Placer tout d'abord les électrodes, puis relier les câbles aux électrodes
- Sélectionner le programme en appuyant sur
- Lancer la stimulation et régler l'intensité appuyer sur ou

Mise en charge des accumulateurs intégrés

- Mettre le commutateur sur << OFF >> .
- Si la batterie est déchargée le voyant sur le chargeur est rouge
- Batterie chargée > 80% le voyant sur le chargeur est orange
- Batterie chargée le voyant sur le chargeur est vert

ATTENTION : Une fois la batterie chargée, débrancher le chargeur du stimulateur, sinon la batterie se décharge dans le chargeur.

- Test d'autonomie interne à ALISEO (réalisé avec les deux voies en programme 1).

I (mA)	25 mA	15mA	10mA	Temps de charge
Temps de décharge	5h50	6h10	7h05	3h

Réglage de l'horloge(TIMER)

- Pour enlever le TIMER pré-réglé à 30 mn sur tous les programmes appuyer simultanément sur et pendant 3 secondes.
- Alors seul s'affiche le TIMER, appuyer sur pour passer en mode TIMER OFF (-- --) puis pour enregistrer.

Verrouillage de l'appareil

- En appuyant simultanément sur et pendant 3 secondes, l'appareil se bloque sur le programme choisi et une clé apparaît à droite du numéro de programme.



N°Azur 0 810 203 200