

FR Notice d'utilisation



Lisez soigneusement et entièrement cette notice d'utilisation avant la première mise en service. Conservez soigneusement cette notice d'utilisation.

Risques en cas de non-respect de la notice d'utilisation :

Le non-respect de la notice d'utilisation peut mettre en danger les personnes et le produit. Les risques suivants peuvent être occasionnés par exemple en cas de non-respect :

- Défaillance de fonctions importantes du produit - et en conséquence un traitement inefficace.
- Mise en danger des personnes en raison d'influences thermiques, électriques, mécaniques, etc. - à tous les niveaux et avec toutes les conséquences en résultant.

Table des matières

1	Kit de livraison.....	76
2	Éléments de fonction.....	76
3	Remarques importantes.....	77
4	Utilisation recommandée.....	78
5	Mise en service.....	79
6	Nettoyage.....	80
7	Remplacement du filtre.....	81
8	Élimination.....	81
9	Caractéristiques techniques.....	82
10	Conditions de transport et d'entreposage.....	84
11	Conditions de garantie.....	85
12	Signification des symboles.....	86

75

3 Remarques importantes

Le compresseur PARI BOY S / PARI BOY SX est un appareil électrique. Lorsqu'il fonctionne, il ne doit pas être laissé sans surveillance ; il ne doit en aucun cas être utilisé dans des locaux exposés aux explosions et dans des locaux humides.

La manipulation de l'appareil exige une parfaite connaissance et l'observation des consignes de la présente notice d'utilisation. L'utilisateur est seul responsable des dysfonctionnements qui peuvent résulter d'une manipulation non conforme à l'utilisation à laquelle il est destiné.

Toute réparation doit être effectuée par PARI ou un centre de services agréé. En cas de réparation dans un de ces centres, une attestation précisant la date, la nature et l'ampleur de la réparation, ainsi que le nom et la signature de l'entreprise en question doit vous être délivrée. N'utilisez l'appareil qu'avec des accessoires PARI.

Pour déconnecter l'appareil du secteur, débranchez la fiche secteur de la prise de courant.



Consignes de sécurité :

- L'appareil ne peut être mis en service ou la fiche secteur doit être immédiatement débranchée lorsque l'appareil ou le câble secteur est endommagé ou lorsqu'un dysfonctionnement est suspecté après une chute par ex.
- La fiche secteur doit être débranchée
 - en cas de pannes au cours du fonctionnement
 - avant chaque nettoyage et entretien
 - après utilisation
- Ne pas tirer la fiche secteur ou le câble hors de la prise de courant avec des mains mouillées.
- Ne pas tirer ou coincer le câble secteur sur des arêtes tranchantes, ne pas le laisser pendre et le protéger de la chaleur et des graisses.
- Les bébés, les enfants en bas âge, les enfants et les personnes dépendantes ne doivent effectuer les inhalations que sous la surveillance permanente d'un adulte. Un traitement sûr et efficace ne peut être garanti que dans ces conditions.
- Le compresseur représente un risque de danger lorsqu'il tombe pour les personnes situés en dessous.

77

1 Kit de livraison

Vérifiez que tous les éléments ci-dessous sont inclus dans le kit du compresseur PARI BOY S / PARI BOY SX (voir figure A) :

PARI BOY S	PARI BOY SX
(1) Compresseur PARI BOY S	(1) Compresseur PARI BOY SX
(2) Nébuliseur PARI LC SPRINT ^{a)}	(2) Nébuliseur PARI LC SPRINT ^{a)}
(3) Tuyau de raccordement	(3) Tuyau de raccordement
(4) Câble secteur	(4) Câble secteur

a) Pour connaître les éléments livrés du kit de nébulisation joint, voir sa notice d'utilisation.

2 Éléments de fonction

Le compresseur PARI BOY S / PARI BOY SX dispose des éléments de fonction suivants (voir illustration B) :

(5) Interrupteur Marche/Arrêt	(9) Prise de raccord au secteur (à l'arrière de l'appareil)
(6) Tuyau de raccordement	
(7) Support de filtre	(10) Plaque signalétique (sur le dessous de l'appareil)
(8) Support pour le nébuliseur	

76

En cas de prêt ou de réutilisation des inhalateurs PARI, il convient de respecter les directives du fabricant à propos de la « préparation des inhalateurs PARI pour une réutilisation après un changement de patient ». Ces directives peuvent être obtenues sur simple demande auprès de PARI GmbH ou sur Internet à l'adresse www.pari.de.

PARI GmbH décline toute responsabilité pour les dommages ou pannes résultant d'une utilisation non conforme de l'appareil.

4 Utilisation recommandée

Combiné à un nébuliseur PARI, le compresseur PARI BOY S / PARI BOY SX est un inhalateur très efficace dans le cadre d'un traitement par inhalation des voies respiratoires inférieures et supérieures avec des aérosols de médicaments. Il permet de pratiquer des inhalations nasales ou orales de courte durée¹⁾ des médicaments prescrits ou recommandés par un médecin dans le cadre d'un traitement par inhalation des voies respiratoires supérieures et inférieures.

Le compresseur PARI BOY S / PARI BOY SX peut fonctionner uniquement avec des nébuliseurs PARI (sauf le PARI LC PLUS UNIVERSAL) et avec les accessoires PARI correspondants. L'utilisation de nébuliseurs et d'accessoires d'autres marques peut entraîner une utilisation non conforme du nébuliseur et peut porter atteinte à l'efficacité de la thérapie puisque le compresseur PARI et le nébuliseur PARI sont ajustés l'un à l'autre.



Avant tout traitement, il est impératif de consulter un médecin. Veuillez utiliser uniquement des médicaments prescrits ou recommandés par votre médecin.

1) Durée d'une utilisation : inférieure à une heure, 20 minutes au max. dans ce cas.

78

5 Mise en service



- L'appareil doit être amené à température ambiante avant la mise en service.
- Posez le compresseur PARI BOY S / PARI BOY SX sur une surface plate et propre, exempte de poussière.
- Ne faites pas fonctionner le compresseur sur des tapis par terre ou dans un environnement très poussiéreux, comme par ex. sous le lit, dans des ateliers, etc.
- Veillez à ce que les orifices d'aération latéraux ne soient pas obstrués.
- Ne recouvrez jamais l'appareil au cours du fonctionnement.
- Contrôlez si la tension du secteur correspond aux indications sur l'appareil.

Illustrations A et B :

- Branchez le tuyau de raccordement (3) en le tournant légèrement dans le raccord (6) du compresseur. Fixez l'autre extrémité sur le nébuliseur PARI (2).
- Connectez le compresseur (1) au secteur :
 - Branchez le câble secteur (4) avec la fiche (9) sur le compresseur.
 - Branchez la fiche secteur du câble secteur dans une prise de courant adaptée.

Pour couper le compresseur PARI du secteur à la fin de l'inhalation, procédez dans l'ordre inverse et débranchez **d'abord** la fiche secteur de la prise de courant.

Lisez intégralement avec attention la notice d'utilisation du nébuliseur et utilisez le nébuliseur conformément à la description.

- Retirez le nébuliseur de son support avant le traitement (8).
- Mettez le compresseur en marche avec l'interrupteur Marche/Arrêt (5).
- Remettez le nébuliseur dans son support après le traitement.



Pour éviter tout problème de santé (infection, par ex.), lisez attentivement le chapitre « Consignes d'hygiène » dans la notice d'utilisation de chaque nébuliseur PARI. Vous devez par ailleurs respecter les consignes de la présente notice d'utilisation en matière de nettoyage et de remplacement du filtre.

79

7 Remplacement du filtre

Le filtre qui se trouve dans la plaque avant de votre compresseur PARI BOY S / PARI BOY SX doit, dans des conditions d'utilisation normales, être remplacé au bout de 200 heures d'utilisation, ou au moins une fois par an. Vérifiez le filtre régulièrement (après 10 ou 12 inhalations). S'il est encrassé (grisâtre ou brunâtre) ou bouché, remplacez-le. Si le filtre est humide, il doit également être remplacé¹⁾.

Ne tentez pas de nettoyer le filtre et de le réutiliser !

Utilisez uniquement le filtre original PARI pour ne pas risquer d'endommager votre compresseur PARI et ainsi compromettre l'efficacité du traitement.

Pour changer le filtre, procédez de la manière suivante (voir illustration D) :

- Dévissez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre le support du filtre (7) de votre compresseur PARI BOY S / PARI BOY SX en utilisant une pièce de monnaie.
- Retirez l'ancien filtre (11) du support de filtre et insérez le nouveau filtre.
- Introduisez le support du filtre avec le nouveau filtre dans votre compresseur PARI BOY S / PARI BOY SX et revissez-le dans le sens des aiguilles d'une montre avec une pièce de monnaie.

8 Elimination

Ce produit est soumis au champ d'application de la directive DEEE²⁾ et est affecté à la catégorie d'équipements 8 : les dispositifs médicaux. Ce produit ne doit pas en conséquence être éliminé avec les déchets ménagers. Les réglementations en matière d'élimination propres à chaque pays doivent être respectées (par ex. élimination par les communes ou par les détaillants).

Le recyclage des matériaux permet de limiter la consommation de matières brutes et de protéger l'environnement.

1) N° de commande 041B4852, disponible dans un magasin spécialisé ou chez PARI GmbH.

2) Directive 2002/96/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.

81

6 Nettoyage



Débranchez le compresseur avant chaque nettoyage et débranchez le câble secteur de la prise.

Illustration C :

- Essuyez la surface extérieure du boîtier de votre compresseur PARI BOY S / PARI BOY SX avec un chiffon humide.



Ne pulvérisez pas de liquide à l'intérieur des fentes d'aération ! Les liquides qui ont pénétré à l'intérieur de l'appareil peuvent entraîner un endommagement du circuit électrique et des autres pièces du compresseur et conduire ensuite à un dysfonctionnement.

Si du liquide a pénétré dans le compresseur, contactez un revendeur agréé ou le centre de maintenance PARI (tél. : +49-(0)8151-279 220 ou info@pari.de). Utilisez de nouveau votre compresseur PARI BOY S / PARI BOY SX uniquement en suivant leurs instructions ou après réalisation d'une inspection et d'éventuelles réparations nécessaires par le revendeur agréé ou le service technique de PARI GmbH.

80

9 Caractéristiques techniques

PARI BOY S

Raccordement électrique :	voir plaque signalétique en dessous du compresseur
Niveau de pression acoustique A maximal évalué du compresseur :	env. 56 dBA selon DIN EN 13544-1, par. 26)
Dimensions du boîtier :	(L x H x P) 18 cm x 11,5 cm x 16 cm
Poids :	1,25 kg
Pression :	env. 1,2 bar
Débit :	env. 4,5 l/min

PARI BOY SX

Raccordement électrique :	voir plaque signalétique en dessous du compresseur
Niveau de pression acoustique A maximal évalué du compresseur :	env. 56 dBA selon DIN EN 13544-1, par. 26)
Dimensions du boîtier :	(L x H x P) 19,2 cm x 14,5 cm x 15 cm
Poids :	1,7 kg
Pression :	env. 1,6 bar
Débit :	env. 5,1 l/min

82