

## addresses

CH

### Nutricia SA Schweiz

Route de l'Industrie 24, CH-1564 Domdidier  
Tél.: +41 (0)26/ 675 25 29 • Info: 0844 844 802 (Lokaltarif/tarif lokal),  
www.nutricia.ch

F

### Nutricia Nutrition Clinique

1 rue Eugène et Armand Peugeot, 92805 Neuilly-Malmaison Cedex  
Tél: 01 47 10 25 25 • Fax: 01 47 10 23 99 • www.nutricia.fr  
SAV: AMM • 67 montée St Menet, Parc de la Buzine Bat "B",  
13011 MARSEILLE • Tél.: 04 91 44 15 92 • Fax: 04 91 44 15 47

www.nutricia.com

**NUTRICIA**  
**flocare® Infinity**

Sécurité et praticité

BPJMC 0412001

**MANUEL D'INSTRUCTIONS**  
Pour nutrition entérale exclusivement  
Lire ce manuel avant d'utiliser la pompe

28386-001 rev A, Instruction manual Flocare® Infinity® France


F

F

## CONTENT

Introduction.....	5
Précautions d'emploi.....	5
Service après vente et garantie.....	5
Instructions d'utilisation.....	6
Alarmes et sécurités.....	10
Maintenance.....	10
Résolutions des problèmes.....	11
Mode Set up.....	12
Spécifications techniques.....	13

flocare® Infinity

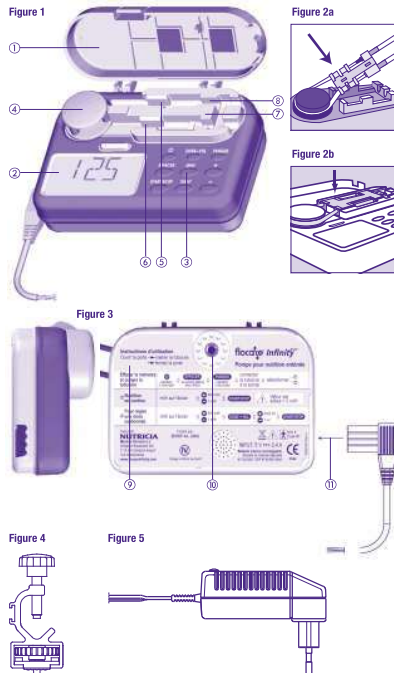

F

## LISTE DE COMPOSANTS:

Fig. 1:  
① Porte  
② Affichage (LCD)  
③ Clavier  
④ Rotor  
⑤ Capteur de pression amont  
⑥ Capteur de pression aval  
⑦ Site insertion cassette  
⑧ Détecteur d'air

Fig. 2a - 2b: Insertion de la tubulure

Fig. 3:  
① Instructions d'utilisation  
② Site insertion support  
③ Connexion de l'adaptateur

Fig. 4: Support

Fig. 5: Chargeur

flocare®

## POUR COMMANDER

**Pompe Flocare® Infinity® France**  
Chargeur Flocare® Infinity®  
Support  
Manuel d'instructions

corporate code 35685

## Accessoires en Option

- Sac à dos Flocare® Infinity® Carry Bag
- Sac à dos Flocare® Infinity® Ourson (Bear Bag)
- Flocare® Infinity® Mini Drip Stand
- Flocare® Infinity® Nurse Call
- Support Flocare® Infinity®
- Chargeur Flocare® Infinity®

corporate code 35757  
corporate code 35758  
corporate code 35715  
corporate code 35752  
corporate code 35753  
corporate code 35755

## Tubulures Flocare® Infinity®

- Tubulures Flocare® Infinity® Pack
- Tubulures Flocare® Infinity® Multicompatible
- Tubulures Flocare® Infinity® Universal
- Tubulures Flocare® Infinity® Sac à dos
- Poches vides Flocare® 1,3 L + Tubulure Flocare® Infinity®

corporate code 35158  
corporate code 35160  
corporate code 35159  
corporate code 35165  
corporate code 35163

## MANUFACTURIER

**Nutricia Medical Devices b.v.**  
Schiphol Boulevard 261  
1118 BH Schiphol Airport  
The Netherlands

flocare® Infinity

flocare® Infinity



Alarme	Cause	AZIONE CORRETTIVA
Pas d'affichage du symbole prise quand la pompe est branchée	<ul style="list-style-type: none"><li>Prise secteur défectueuse.</li><li>Adaptateur en panne.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Changer de prise.</li><li>Contacter le professionnel de santé ou votre fournisseur pour changer l'adaptateur.</li></ul>

### MODE SET UP (MODE PARAMÉTRAGE)

Le mode "set up" peut être utilisé pour:

- réglér le volume de l'alarme,
- bloquer le clavier,
- éteindre une alarme quand la dose est terminée,
- allumer l'écran de façon permanente quand la pompe est sur secteur.

Ce réglage ne peut être effectué que par le personnel soignant ou autre personne autorisée. Le patient ou sa famille ne sont pas autorisés à modifier les réglages de la pompe sans permission préalable du médecin, diététicien, infirmier ou autre personne autorisée.

#### Réglage de l'alarme sonore



Allumer la pompe en pressant en même temps la touche et la touche "+". La pompe se met en mode set up. Régler d'abord le niveau d'alarme:

"BIP FORT" (+) ou "BIP BAS" (-)

Utiliser les touches "+" ou "-" pour diminuer ("fort" à "bas") ou augmenter ("bas" à "fort") le volume de l'alarme sonore.

#### Verrouillage du clavier



Appuyer sur la touche "PURGER" pour verrouiller (VERROU) ou déverrouiller (NON VERROU) le clavier. En mode verrouillé "VERROU", les paramètres d'alimentation programmés ne peuvent pas être modifiés. Utiliser les touches "+" ou "-" pour changer le réglage de VERROU à NON VERROU ou vice versa.

#### Pour supprimer l'alarme fin de dose



Appuyer sur la touche "PURGER" pour le réglage suivant:

"BIP FIN DOSE" (+): alarme à la fin de la dose programmée.

"NO BIP" (-): pas d'alarme en fin de dose.

Utiliser les touches "+" ou "-" pour changer le réglage de "BIP FIN DOSE" à "NO BIP" ou vice versa.

### Eclairage de l'écran



Appuyer la touche "PURGER" pour le réglage suivant:

"LUM ON" (+) l'écran LCD reste allumé quand la pompe est branchée. "LUM OFF" la lumière de l'écran s'éteint après quelques secondes.

Utiliser les touches "+" ou "-" pour changer le réglage de "LUM ON" à "LUM OFF" ou vice versa.

Pour sortir du mode SET UP appuyer 2 secondes sur la touche . Le réglage sera automatiquement sauvegardé.

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Cette pompe Flocare® Infinity™, son adaptateur et l'accessoire Flocare® Infinity+™ Nurse Call sont conformes aux normes relatives aux règles de sécurité des appareils électromédicaux et à leur compatibilité électromagnétique: EN60601-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, RTCA DO-1600 et à la directive 93/42/CEE. 0344
- IEC 601: classe II Dispositif médical classe: IIa
- Contrôle par microprocesseur
- Équipement BF
- Chargeur: secteur 100-240 V 50-60Hz capacité courante minimale de 0.75 Amp pour (100 V AC ) ou 0.35 Amp (pour 240 V AC) sortie 5 V DC 2.4 A.
- Batterie: batterie interne rechargeable Lithium Ion, 3.6 V DC 2000 mAh
- Autonomie de la batterie / 24 h à 125ml/h
- Étanche aux projections d'eau: IPX-5
- Façades: ABS/PC anti-feu
- Dimensions: 140 x 95 x 35 mm
- Poids/approx. 392 g
- Précision du débit: ±5,0% avec les tubulures Flocare® Infinity™
- Humidité: En fonctionnement: 30% à 75% sans condensation  
Stockage: 10% à 95 % sans condensation
- Température: En fonctionnement: +5°C à +40°C  
Stockage et transport: -20°C à +65°C
- Pression atmosphérique: En fonctionnement: 70-106 kPa  
Stockage et transport: 50-106 kPa
- Pression d'occlusion: En amont: -34 kPa (tolérance 21 kPa)  
En aval: 83 kPa (tolérance 21 kPa)
- Détection de bulles d'air: la quantité d'air qui doit passer devant le détecteur d'air avant que le container ne soit vide varie de 0,5-1 ml, ce qui correspond à une bulle d'air d'une longueur de 6-13 cm au niveau de l'insert silicone.
- La pompe Flocare® Infinity™ peut être utilisée en sécurité dans les avions de ligne.
- L'utilisation d'autres accessoires, transducteurs et câbles que ceux listés dans ce manuel sont susceptibles d'altérer votre équipement.
- Les appareils électriques médicaux nécessitent des précautions particulières et doivent être installés et mis en service selon les normes EMC fournies avec leurs documents.

- Ordinateur portable et téléphone portable peuvent affecter les dispositifs médicaux électriques. En cas de proximité d'autres équipements, vérifier le bon fonctionnement de la pompe avant toute utilisation.
- Pour se procurer une pompe, contacter votre fournisseur Nutricia.