

Notice simplifiée – Pompe Infusomat Space

1. Démarrer une perfusion




Allumez l'appareil

Ouvrez la porte en appuyant sur ce bouton



Confirmez l'ouverture de la porte

Insérez la tubulure : respectez les détrompeurs, insérez le clamp vert à l'horizontale et refermez la porte en appuyant bien

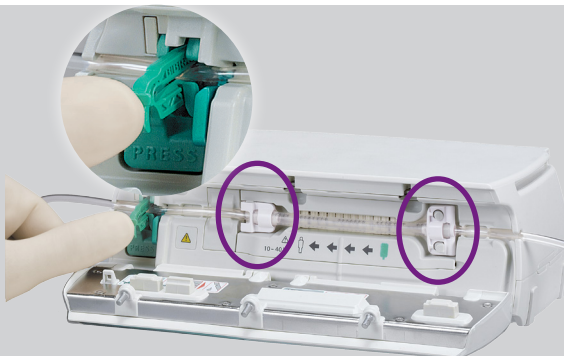

Appuyez sur OK pour valider le modèle de tubulure utilisé

Appuyez sur OK pour entrer un débit en mL/h (VAP = volume à perfuser)



ou



Réglez le débit avec les flèches haut et bas

Démarrez la perfusion



S'habituer à un nouvel appareil n'est jamais simple : c'est pourquoi nous proposons un e-learning et des sessions avec nos formateurs !

Notice simplifiée – Pompe Infusomat Space

2. Arrêter une perfusion




Stoppez la perfusion

Ouvrez la porte en appuyant sur ce bouton :



Confirmez avec la flèche du haut et tirez la porte à fond vers vous

Libérez le clamp en appuyant sur le levier vert, retirez la tubulure et refermez la porte en appuyant bien

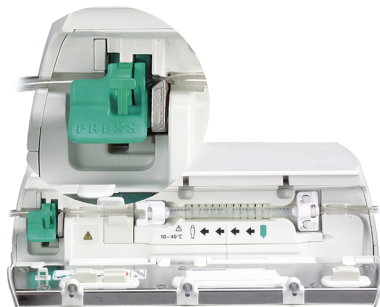

Eteignez l'appareil en restant appuyé 3 secondes



Besoin d'un bolus ?

Appuyez sur  puis restez appuyé sur  le temps du bolus !

Pour toute information sur les dispositifs médicaux de la gamme B. Braun Space, se reporter à la notice complète correspondante. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, est interdite sauf autorisation expresse et préalable de B. Braun. Document réservé aux professionnels de santé. Réf. AIS_20170211 - Ed. 06/2017

Lorsque vous ouvrez la porte pour retirer la tubulure, il faut tirer à fond la porte vers vous : cela permet de clamper la ligne et d'éviter les écoulements !