

MY EASYCRYO



MKS Paris

Zone Ecoparc

27 rue Mézière Christin

34690 FABREGUES

FRANCE

Téléphone : 04.99.64.21.05

www.easycryo.fr

DESCRIPTION DU SYSTEME

Le dispositif MY EASYCRYO n'est pas un dispositif médical.

Le système MY EASYCRYO est composé des éléments suivants :

1. Le module de commande programmable
2. Un sac de transport
3. Un adaptateur secteur
4. Un manuel d'utilisation
5. Un bidon 2,5L :
 - Mode d'utilisation avec bac 2,5 L : 1,25 L d'eau réfrigérée + Glaçons avec limite max 2,25 L ou bac au congélateur avec 1,25 L d'eau + ajouter 1 L eau réfrigérée avant usage
 Il est recommandé d'utiliser de l'eau déminéralisée pour préserver les circuits de l'appareil.
6. Une batterie externe (en option)

Le système peut également être livré avec une ou plusieurs attelles. Seules les attelles vendues par MKS PARIS sont compatibles avec ce système.

Les références des attelles disponibles sont listées dans le tableau ci-dessous.

Chaque attelle intègre un circuit pour l'eau et un circuit pour l'air. Ces deux circuits sont indépendants et parfaitement étanches l'un par rapport à l'autre.

Une rallonge est nécessaire pour permettre la connexion entre les attelles et l'appareil.

LISTE DES ATTELLES DISPONIBLES :

DESIGNATION	REFERENCE
ATTELLE ICE COMPRESSION MEMBRE SUP	IC100L
ATTELLE ICE COMPRESSION EPAULE GAUCHE	IC200L-L
ATTELLE ICE COMPRESSION EPAULE DROITE	IC200L-R
ATTELLE ICE COMPRESSION EPAULE GAUCHE A USAGE MULTIPLE	ICUM200L-L
ATTELLE ICE COMPRESSION EPAULE DROITE A USAGE MULTIPLE	ICUM200L-R
ATTELLE ICE COMPRESSION HANCHE AMBIDEXTRE	IC300-A
ATTELLE ICE COMPRESSION HANCHE A USAGE MULTIPLE	ICUM300A
ATTELLE ICE COMPRESSION CUISSE (Genou large)	IC400L
ATTELLE ICE COMPRESSION CUISSE - USAGE MULTIPLE	ICUM400L
ATTELLE ICE COMPRESSION GENOU (Genou moyen)	IC500M
ATTELLE ICE COMPRESSION GENOU ARTICULEE	IC500-A
ATTELLE ICE COMPRESSION CHEVILLE	IC600L
ATTELLE ICE COMPRESSION CHEVILLE A USAGE MULTIPLE	ICUM600L
ATTELLE ICE COMPRESSION DEMI-JAMBE	IC650L
ATTELLE ICE COMPRESSION LOMBAIRE	IC800

Un emplacement est disponible à l'arrière de la sacoche My Easycryo pour faciliter le transport de votre attelle.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS	400L x 22l x 25h
POIDS A VIDE	1.8 kg
POIDS REMPLI D'EAU	3.5 kg
PRESSIION MAXIMUM DANS L'ATTELLE	75 mmHg
PRECISION DE LA PRESSIION D'AIR	±5 mmHg*
PRECISION DE LA TEMPERATURE D'EAU	±1°C**
TEMPS DE FONCTIONNEMENT	De 5 à 120 minutes***
SORTIE DC	12V, 1A
TEMPERATURE DE STOCKAGE	De 5 à 40 °C et de 10 à 90 % d'humidité
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	1 °C à 40 °C
ALTITUDE DE FONCTIONNEMENT MAXI.	< 2000 m
DUREE DE VIE DU MODULE DE COMMANDE	5 ans
DUREE DE VIE DES PIECES ET ACCESSOIRES	2 ans pièces et 1 an accessoires

*La pression est réglable de 0 mmHg à 75 mmHg avec des paliers de 5 mmHg.

**La température de l'eau dépend de la quantité de glace mise dans le bac et elle est indiquée en direct sur l'écran de l'appareil

*** Le temps de fonctionnement est réglable de 5 minutes à 120 minutes avec des paliers de 5 minutes

PRECAUTIONS D'UTILISATION – MISES EN GARDE














Les utilisateurs doivent **IMPERATIVEMENT** lire ce manuel avant d'utiliser la machine.

Ceci n'est pas un dispositif médical.

Cet appareil ne peut pas être utilisé par des enfants. Cependant, des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance peuvent l'utiliser, si elles sont correctement surveillées ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.

Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec l'alimentation externe fournie avec le produit et doit être seulement alimenté en très basse tension de sécurité (TBTS).

	Alimenté en continu
	Identifie les équipements de classe III qui sont spécifiques des installations très basse tension de sécurité (TBTS)
	Consulter la notice d'utilisation
	NE PAS JETER DANS LES ORDURES MENAGERES : Ce pictogramme apposé sur le produit lui-même et figurant dans ce manuel, indique que les batteries et l'électronique doivent être séparées des ordures ménagères. Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des batteries et des appareils usagés, veuillez les déposer à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur.
	Attention
	Numéro de série
	Numéro de lot
	Attention : consulter le mode d'emploi
	Fabricant
	Référence
	Date de fabrication

S'assurer que l'attelle est bien positionnée et que la surface soit bien en contact avec le membre de l'utilisateur. Si un pli se forme, cela peut ralentir l'écoulement d'eau et détériorer la pompe à eau. Un message d'erreur apparaît.

En cas de doute, il est conseillé de vérifier d'abord l'attelle puis la rallonge.



AVERTISSEMENTS :

- Cesser immédiatement d'utiliser le système si le l'utilisateur ressent une sensation de gêne
- Surveiller la peau au niveau de la zone traitée et cesser immédiatement d'utiliser le système si des changements tels que des rougeurs aggravées apparaissent. Si nécessaire, adapter les réglages de plage de température ou attendre plus de temps entre les séances.
- Les attelles compatibles avec la machine MY EASYCYRO ne sont pas stériles
- Les attelles compatibles avec la machine MY EASYCRYO sont disponibles pour plusieurs parties du corps et existent dans plusieurs tailles mais ne sont pas indiquées pour toutes les utilisations physiologiques possibles. L'attelle pour cheville, par exemple, n'est pas conçue pour être utilisée sur les orteils.
- L'appareil peut être utilisé en intérieur et en extérieur.

IMPORTANT : LIRE L'ENSEMBLE DES INDICATIONS, CONTRE-INDICATIONS, MISES EN GARDE ET AVERTISSEMENTS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

MISES EN GARDE :

- Pour éviter le risque de choc électrique, ne pas tenter de retirer le pavé de commande ni d'ouvrir la partie contenant les pompes et les cartes électroniques. Toute tentative d'ouverture ou toute ouverture de ces parties entraînerait l'annulation de la garantie MKS PARIS. Pour les réparations, contacter le service client de MKS PARIS au 04 99 64 21 05 ou votre revendeur.
- Pour éviter le risque de choc électrique, toujours éteindre le système et débrancher le câble d'alimentation de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant d'ajouter ou de vider la glace et l'eau.
- Ne pas utiliser un autre adaptateur secteur que celui fourni par MKS PARIS. L'utilisation d'autres adaptateurs risque de provoquer un choc électrique entraînant l'annulation de la garantie MKS PARIS.
- Pour éviter les chocs électriques, les pannes ou l'endommagement du produit, ne jamais utiliser le système avec des câbles d'alimentation ou des tuyaux endommagés, ni en présence d'autres dommages mécaniques, ou si l'appareil ne fonctionne pas tout à fait normalement.
- N'utiliser que de la glace et de l'eau dans le compartiment à glace.
- Limiter le remplissage des bacs à eau à 2.25 litres.
- Pour éviter d'endommager le produit, ne pas utiliser les attelles provenant d'autres fabricants.
- Pour éviter d'endommager le produit, ne pas utiliser le module de commande sans qu'une rallonge ne soit connectée au circuit.
- Pour éviter d'endommager le produit, ne pas marcher sur les tuyaux ni sur les attelles et ne pas entreposer d'objets dessus. Ils risqueraient de se déformer, de s'écraser voir de se percer.
- Pour éviter les blessures, veiller à ne pas laisser traîner les câbles d'alimentation ou les tuyaux afin de ne pas trébucher dessus.
- Surveiller la position du tuyau et du cordon lorsqu'ils sont utilisés. Les ranger lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter tout risque de strangulation.
- Maintenir le système, les tuyaux et les cordons, hors de portée des enfants et des animaux.
- Agir avec précaution lors de la manipulation des petites pièces pour réduire la possibilité d'ingestion ou d'inhalation.
- Pour éviter d'endommager le produit, le manipuler avec soin, comme s'il s'agissait d'un ordinateur portable. Ne pas le laisser chuter, ne pas cogner dessus, ne pas s'asseoir dessus, ne pas monter dessus. Ce type d'usage abusif annule toutes les garanties MKS PARIS.
- Ce symbole, figurant sur le contrôleur ou son emballage, signifie que le produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Pour connaître les lieux de mise au rebut des déchets électriques et électroniques, contacter un service de traitement des déchets.
- Aucune mesure de mise au rebut spécial n'est nécessaire pour les attelles.



AVERTISSEMENTS :

- Il convient d'éviter d'utiliser cet appareil à côté d'autres appareils ou empilé avec ces derniers parce que cela peut occasionner un mauvais fonctionnement. Si cette utilisation est nécessaire, il convient d'observer cet appareil et les autres appareils pour en vérifier le fonctionnement normal. Si cet appareil crée des interférences nuisibles avec d'autres dispositifs, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, il est recommandé que l'utilisateur tente d'en corriger la cause en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes : Réorienter ou déplacer le dispositif receveur / Accroître la distance séparant les appareils. Brancher l'appareil sur une prise ou un circuit différent de ceux sur lesquels le ou les autres appareils sont branchés.

Consulter le fabricant pour obtenir de l'assistance.

- L'utilisation d'accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés ou fournis par le fabricant de cet appareil peut provoquer une augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de l'immunité de cet appareil et occasionner un fonctionnement inapproprié

Cet appareil est un dispositif CE qui a été testé conformément aux normes EN 55014-1/2, EN 62233, EN 61000-3, EN 60335-1. Si cet appareil crée des interférences nuisibles avec d'autres dispositifs, il est recommandé de prendre une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer les dispositifs
- Augmenter la distance séparant les appareils
- Brancher l'appareil sur une prise/circuit différents de ceux sur lesquels le ou les autres appareils sont branchés
- Consulter le fabricant pour obtenir de l'assistance

Toute intervention technique sur l'appareil My Easycryo est interdite sans l'accord préalable du fabricant.

INDICATIONS

Le système MY EASYCRYO associe deux types d'applications : la pressothérapie et la cryothérapie.

Il permet de :

- réduire les crampes et contractures musculaires après efforts intenses
- resserrer les vaisseaux sanguins et limite la diffusion de l'inflammation
- drainer, les cellules musculaires lésées se régénèrent plus rapidement
- oxygéner les muscles

Il est conçu pour être utilisé par des particuliers adultes sans limite d'âge, souhaitant une récupération musculaire et physiologique plus rapide.

CONTRE-INDICATIONS

La machine MY EASYCRYO possède deux fonctions :

- Une fonction de compression qui permet de réaliser de la compressothérapie
- Une fonction de froid qui permet de réaliser de la cryothérapie

Ces deux actions peuvent être combinées ou non.

La **compressothérapie** n'est pas indiquée pour des personnes :

- Dont la partie du corps concernée souffre d'une phlébite sévère.
- Dont la partie du corps concernée a subi des antécédents ou une prédisposition du diagnostic de thrombose veineuse sévère ou d'une embolie pulmonaire. Il en est de même pour des personnes à qui on a exigé un repos prolongé.
- Dont la partie du corps concernée souffre d'une importante artériosclérose ou de tout autre trouble cardiovasculaire ischémique.
- Dont la partie du corps concernée à un flux sanguin lymphatique ou veineux sensible (cas du cancer).
- Souffrant d'une insuffisance cardiaque.
- Présentant tous les facteurs de risque importants ou les signes courants d'embolie (par exemple : embolie pulmonaire, infarctus cérébral, fibrillation auriculaire, endocardite, infarctus du myocarde ou plaque athéromateuse embolique).
- Utilisateurs ayant une hypertension décompensée dans la région concernée.

La **cryothérapie** est contre-indiquée chez les personnes :

- Souffrant d'une sérieuse insuffisance vasculaire au niveau de la partie concernée

- Souffrant d'une cryoglobulinémie ou hémoglobinurie

INSTRUCTIONS D'UTILISATION - MISE EN ROUTE

Afin de réaliser la mise en route du système MY EASYCRYO, vous devez vous assurer que vous possédez les éléments suivants :

- Un **module de commande programmable** accompagné d'un bac rempli d'eau et de glace. Il est nécessaire de remplir chaque bac d'eau avec une quantité minimum de 1.25 litres d'eau, afin que l'eau puisse remplir l'attelle et circuler dans le système. Il est possible de compléter ensuite avec de la glace jusqu'au niveau indiqué sur les bacs d'eau (2L).
- Les **rallonge** eau/air de connexion aux attelles
- L'**adaptateur secteur**
- Une **attelle**
- Une **batterie** en option

Chaque attelle est composée d'une poche contenant le circuit d'eau et le circuit d'air et d'une housse de protection en tissu ou en matière désinfectable (disponible uniquement pour les attelles à usage multiple) qui permet de maintenir l'attelle en position sur l'utilisateur.

L'appareil MY EASYCRYO doit être placé sur une surface plane et horizontale afin d'éviter une fuite d'eau du réservoir. Veillez également à ne pas positionner la rallonge ou le câble d'alimentation au secteur dans un lieu de passage. Cela risquerait d'occasionner des chutes et d'endommager le système.

Si le système est utilisé dans un environnement dont la température ambiante est trop élevée, cela risque d'impacter la capacité du système à délivrer du froid.

AVERTISSEMENT :

- Afin d'éviter tout risque de choc électrique, il est recommandé de débrancher l'adaptateur secteur de la prise de courant avant de procéder au rechargement en eau et en glace.

PROCEDURE DE MISE EN ROUTE :


1. Poser la sacoche sur une surface plane et horizontale



- Ouvrir le compartiment du milieu pour accéder au bac à eau situé à l'intérieur. Pour cela, il vous suffit d'ouvrir la fermeture éclair



- Retirer les 2 tuyaux d'arrivée et de sortie d'eau ainsi que la sonde de température. Vous pouvez sortir le bac de la sacoche
- Dévisser le bouchon de remplissage et remplir le bac avec 1.25L d'eau au minimum puis ajouter de la glace jusqu'à atteindre 2L d'eau au maximum. Vous pouvez aussi remplir le bac d'un litre d'eau et le placer au congélateur quelques heures avant l'utilisation pour que cela forme un bloc de glace. Il vous suffira de rajouter de l'eau (jusqu'à 2L) avant de commencer à utiliser l'appareil
- Revisser le bouchon de remplissage puis remettre le bac dans son compartiment en veillant à bien repositionner les tuyaux d'arrivée et de sortie d'eau ainsi que la sonde de température
- Refermer le compartiment contenant le bac à eau
- Prendre la rallonge qui se trouve dans le compartiment de droite puis la connecter à l'appareil My Easycryo en insérant les connecteurs femelles de la rallonge aux connecteurs mâles de l'appareil. Pousser les connecteurs femelles jusqu'à la butée. Connecter ensuite l'autre extrémité de la rallonge à l'attelle
- Brancher l'adaptateur secteur à une prise ainsi qu'à l'arrière du module de commande My Easycryo se trouvant dans l'emplacement gauche de la sacoche (ouvrir le compartiment à l'aide de la fermeture éclair).

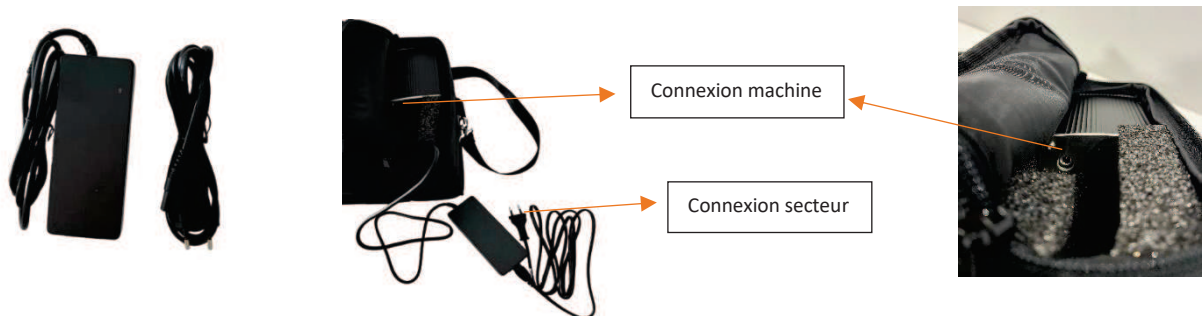

- L'écran de démarrage suivant s'affiche



MODES DE FONCTIONNEMENT :

Marche/arrêt : appuyer 3 secondes sur le bouton du milieu pour arrêter le module de commande My Easycryo (idem pour le rallumer)

Pause : appuyer une fois sur le bouton du milieu pour mettre pause. Appuyer une fois également pour retirer la pause

Arrêt de la séance : appuyer longuement sur le bouton du milieu pour arrêter la séance et confirmer en appuyant une deuxième fois sur ce même bouton (la purge se lancera automatiquement pour une durée de 60 secondes).

Réglage de la durée : appuyer sur les boutons + ou – se trouvant au-dessus et en dessous de « Time ». La durée se règle par paliers de 5 minutes avec une durée de 5 minutes au minimum et une durée de 120 minutes au maximum


Réglage de la pression : appuyer sur les boutons + ou – se trouvant au-dessus et en dessous de « Pressure ». La pression se règle par paliers de 5 mmHg avec une pression de 0 mmHg au minimum et une pression de 75 mmHg au maximum

Purge : à la fin de chaque soin une purge automatique se lance permettant de vider l'attelle de l'eau. Veiller à bien laisser la purge se terminer avant de déconnecter l'attelle et/ou la rallonge (un signal sonore signale la fin de la purge). La purge dure 60 secondes et un décompte est visible à l'écran

Conservation des paramètres : les paramètres temps et pression sélectionnés avant d'éteindre l'appareil sont conservés

SEQUENCE D'UNE SEANCE :

Avant qu'une séance ne commence, une période remplissage de l'attelle est nécessaire et dure 1 minute.

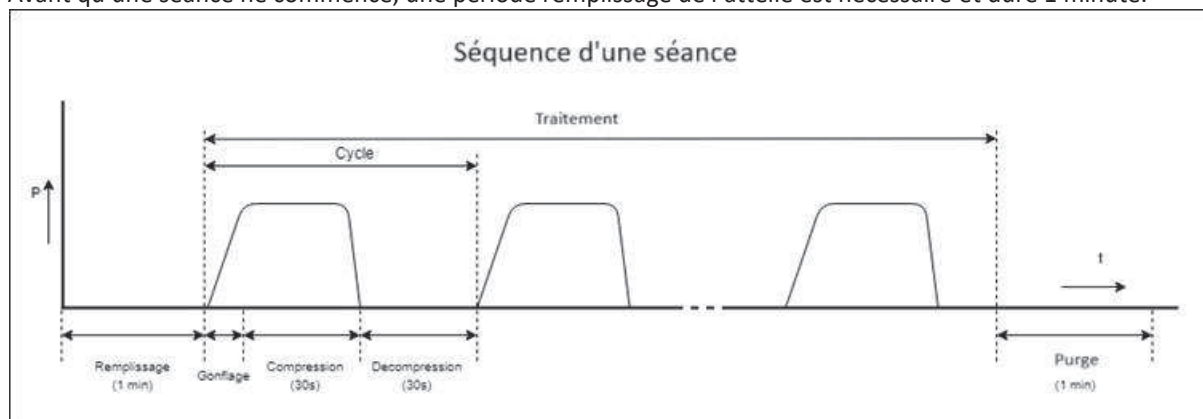

Lorsque l'attelle est remplie, la séance se lance.

Une séance est composée de plusieurs cycles dans lesquels sont compris le gonflage, le temps de compression et le temps de décompression. Pour chaque cycle, le temps de gonflage n'est pas comptabilisé. Le décompte se met en pause lors du gonflage. Lorsqu'une durée de 30 minutes est sélectionnée, par exemple, il s'agit de 30 minutes de séance efficaces (donc sans prise en compte du temps de gonflage). En réalité la séance durera alors un peu plus de 30 minutes (environ 5 minutes de plus).

En fin de séance a lieu la purge qui dure 1 minute.

ENTRETIEN DE LA MACHINE

- Si une attelle n'est pas purgée et reste inutilisée, un dépôt de calcaire peut se créer et cela pourra engendrer des problèmes de fonctionnement
- Changer l'eau du bac tous les jours. Il est recommandé d'utiliser de l'eau déminéralisée si l'eau du robinet est trop calcaire
- Nettoyer le circuit d'eau avec du vinaigre blanc 1 fois par trimestre : 0.5L de vinaigre blanc et 1.5L d'eau. Faire circuler l'eau dans le système comme lors d'une séance d'utilisation de 20 minutes en mettant la pression à 0
- Si la machine n'est pas utilisée pendant plusieurs jours, il est recommandé de vider le bac à eau
- Vider l'eau contenue dans le bac si la machine doit être déplacée pour éviter que l'eau ne se renverse dans la sacoche

NETTOYAGE DU MODULE DE COMMANDE

- La surface extérieure du module de commande peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon doux et l'un des produits suivants (ou un spray de type « Surfanios ») :
 - Détergent doux
 - Alcool isopropylique à 70 %
- **NE PAS UTILISER :**
 - Désinfectants phénoliques
 - Nettoyants à base de solvants. Ceci risque d'endommager les plastiques et annule la garantie.
 - Matériaux abrasifs. Ceci risque d'endommager les plastiques et annule la garantie.
- **ATTENTION :** le module de commande n'est pas étanche à la projection directe de liquide, ne pas l'immerger, ne pas laisser des liquides ruisseler à sa surface.



NETTOYAGE DES CONNECTEURS

- La surface extérieure des connecteurs peut être essuyée avec un chiffon doux et l'un des produits suivants :
 - Détergent doux
 - Alcool isopropylique à 70 %
- **NE PAS UTILISER :**
 - Désinfectants phénoliques
 - Nettoyants à base de solvants. Ceci risque d'endommager les plastiques et annule la garantie.
 - Matériaux abrasifs. Ceci risque d'endommager les plastiques et annule la garantie.
 - Lubrifiants à base de pétrole. Ceci endommage les joints toriques et annule la garantie. Si une lubrification est nécessaire, il est recommandé d'utiliser un spray à base de silicone sec.

NETTOYAGE DES ATTELLES

- Retirer avec précaution la poche contenue à l'intérieur de la housse de protection. Laver la housse de protection à l'eau froide ou tiède à l'aide d'un détergent doux ou d'une solution antibactérienne. Ne pas utiliser d'adoucissant textile. Suspendre pour sécher.
- La surface extérieure de la poche peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon humide. Laver à la machine en mode fragile. Ne pas exposer au soleil.
- Pour les housses à usage multiple : essuyer l'intérieur et l'extérieur de la housse avec un désinfectant de surface de type Surfanios entre chaque utilisation.

NETTOYAGE DU SAC DE TRANSPORT

Le sac de transport doit être nettoyé avec un linge doux ou une brosse douce et un détergent doux. Veiller à tester tout produit sur une petite partie du sac pour s'assurer qu'il ne l'endommagera pas.

ENTREPOSAGE

Pour ranger le système My Easycryo débrancher l'adaptateur secteur du module de commande.
Débrancher la rallonge du module de commande.
Vider le bac d'eau et essuyer l'excédent d'eau si besoin.

Ne pas entreposer dans des températures extrêmes (inférieures à 5°C ou supérieures à 40°C).
Tenir le module éloigné de la lumière directe du soleil (les rayons UV peuvent l'endommager).

DIAGNOSTIC DES PANNES

Liste des messages d'erreurs :

- « Compression error »
 - ⇒ L'appareil n'arrive pas à atteindre la pression souhaitée dans le temps maximal prévu
- « Drive error »
 - ⇒ Indique une erreur dans un des circuits qui pilotent la pompe et les 2 compresseurs (tension trop basse, courant trop élevé, surchauffe de la puce)

Sonde de température débranchée :

La température n'est plus indiquée à l'écran et elle est remplacée par « -- »
Contacter le fabricant ou votre distributeur.

En cas de circuit d'eau bouché :

Vérifier que les deux tuyaux du bac à eau ne soient pas pincés, vérifier avec une autre attelle, vérifier que l'attelle ne soit pas pliée ou que l'utilisateur n'écrase pas la poche ou les tuyaux en sortie d'attelle.

En cas de fuite d'eau :

Si vous constatez une fuite au niveau de la poche d'une attelle, ne plus utiliser l'attelle.
Si vous constatez une fuite au niveau des connectiques, s'assurer qu'elles sont enclenchées à fond et que les connecteurs sont propres.

Si l'eau ne circule plus dans l'attelle, il n'y a plus de froid :

Vérifier qu'il y a suffisamment d'eau (minimum 1,5 L) et que les tuyaux dans le bac atteignent bien l'eau.
Vérifier avec une autre attelle.
Si pas de bruit, la pompe à eau est bloquée. Contacter le fabricant ou votre distributeur.

Si l'attelle ne se gonfle plus :

Si la pression ne monte pas dans l'attelle, essayer avec une autre attelle.
Si l'essai avec une autre attelle aboutit au même résultat, cela signifie qu'il y a un problème avec la pompe à air ou le circuit d'air. Dans ce cas, contacter le fabricant ou votre distributeur.
Si l'essai avec une autre attelle est concluant, cela signifie que l'attelle qui ne se gonfle pas est percée ou que la prise de cette attelle est bouchée. Il ne faut plus l'utiliser.

MAINTENANCE

Il est conseillé de vérifier l'état des tuyaux qui vont vers les bacs à eau ainsi que l'état des connecteurs des rallonges et attelles.

Si les tuyaux ont un dépôt de calcaire ou s'ils sont jaunes, merci de faire un entretien avec du vinaigre blanc pour nettoyer le circuit d'eau.

Si les connecteurs se bouchent, cela va faire forcer les pompes à eau ou les rendre hors service.

Le circuit d'eau peut être bouché ou alors le débit d'eau sera réduit si du calcaire se trouve dans le circuit. Cela engendre un froid moins intense et donc une sensation de froid limitée.

Prévoir une révision du dispositif et changement des connecteurs rallonge et attelle.

REVISION

Au bout de 500 heures d'utilisation un message s'affichera à l'écran vous conseillant de faire une révision à votre appareil.

Contactez votre distributeur ou le fabricant pour que cela soit mis en place.

CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

Le système My Easycryo est garanti contre tout vice de construction ou défaut de matière aux conditions définies ci-dessous.

Nous garantissons notre matériel pendant une période de 1 an au premier utilisateur, à partir de la date de facturation du fabricant. Pendant cette période nous nous engageons à échanger ou réparer gratuitement toute pièce reconnue par nous défectueuse, sans que toutefois l'échange complet de l'appareil puisse être exigé. L'alimentation, les accessoires ainsi que la batterie sont garantis 1 an. Les frais de déplacement, le transport éventuel pour l'aller et le retour de l'appareil ou des pièces détachées dans l'atelier du service après-vente, ne font pas partie de cette garantie constructeur. La garantie n'est valable que si le bon de garanti dûment rempli nous a été expédié dans les quinze jours après la réception du système et ce quel que soit le pays.

La garantie n'est pas applicable en cas de :

- Mauvais usage avec calcaire dans le circuit et/ou bac à eau
- Dommages survenus au cours du transport. Les appareils voyagent aux risques et périls du destinataire. Il appartient à celui-ci avant d'en prendre livraison de vérifier qu'il soit en parfait état
- Non observation des règles d'installation et d'utilisation du présent manuel, défaut d'entretien, d'utilisation ou d'un autre chargeur que celui fourni
- Revente de l'appareil
- Modification, montage ou démontage de l'équipement et d'une façon générale toute intervention non prévue au présent manuel est effectuée sur l'équipement par un client ou un tiers
- Utilisation d'attelles ou de pièces de rechange inappropriées autres que celles de la marque EasyCryo
- Détérioration anormale des câbles et des raccords
- Cas de force majeure, chute, incendie, inondation, foudre

Les échanges et réparations au titre de la garantie ne peuvent pas avoir pour effet d'en prolonger la durée. Les pièces remplacées deviennent notre propriété.

Aucune indemnité ne pourra être accordée pour privation de jouissance.

De convention expresse, toute responsabilité est déclinée en cas d'utilisation dépassant le cadre de la qualification professionnelle ou de mauvaise utilisation de l'appareil.

Le tribunal de commerce de Montpellier (France) est seul compétent en cas de différend et ceci malgré toute clause d'attribution de juridiction différente pouvant figurer sur les factures de commerce des parties contractantes.

BON DE GARANTIE

NOM Prénom :	
NOM DE L'ETABLISSEMENT	
ADRESSE	
VILLE	
CODE POSTAL	
PAYS	
NUMERO DE SERIE	
DATE D'ACHAT	
CACHET	

Bon de garantie à retourner complété par courrier ou mail à :

MKS PARIS
ZONE ECOPARC
27 RUE MEZIERE CHRISTIN
34690 FABREGUES
FRANCE

Contact mail : contac@easycryo.fr

Notes :

Notes :



Société MKS PARIS

ZONE ECOPARC
27 RUE MEZIERE CHRISTIN
34690 FABREGUES
FRANCE

SAS au capital de 359 520€

☎ Téléphone : +33. (0)4.99.64.21.05
Fax : +33. (0)4.99.64.21.06
contact@easycryo.fr

☎ Téléphone SAV : +33. (0)4.99.64.21.09
sav@easycryo.fr



Ceci n'est pas un dispositif médical