

# FrEE

## CRONO PAR 50









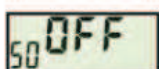






Pompe à perfusion ambulatoire  
pour le traitement de la  
maladie de Parkinson




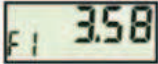


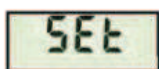




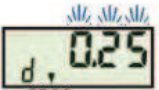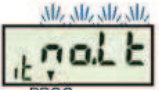




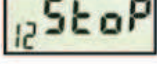
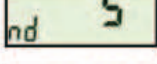
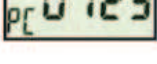






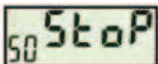

### INSTRUCTIONS RAPIDES

**Touches temporisées** : l'action doit se prolonger pendant quelques secondes avant que la commande ne soit exécutée.

Le résumé des présentes instructions ne se substitue pas à la nécessité de lire les informations données dans le manuel et ne représente qu'une synthèse rapide des fonctions du dispositif.

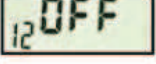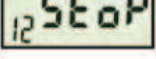


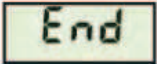

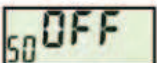
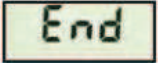

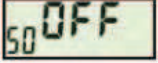










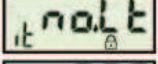

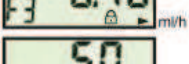
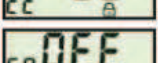
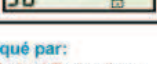
	TOUCHES	SÉLECTION DE LA VERSION DE LA POMPE	ÉCRAN
POMPE SUR OFF	<ul style="list-style-type: none"> <li> (maintenir enfoncé)</li> <li></li> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pompe sur OFF</li> <li>• Nombre de doses bolus distribuées au cours de la dernière perfusion (après 2 secondes)</li> <li>• Affichage du nombre de perfusions (après 6 secondes)               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Phase de sélection de la version de la pompe (après 10 secondes)</li> </ul> </li> <li>• Accès à la phase de sélection de la version de la pompe</li> <li>• Sélection de la version de la pompe (FrEE/Auto)</li> </ul> <p style="text-align: center;">• Pompe sur OFF</p>	     
POMPE SUR OFF	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pompe sur OFF</li> <li>• Programmation du volume de la dose bolus (de 0,00 à 2,00 ml)</li> <li>• Programmation de l'intervalle entre les doses bolus (de « no,Lt » à 24 heures)</li> <li>• Programmation du débit F1 (de 0,05 à 5,00)</li> </ul>	   

	TOUCHES	ADMINISTRATION DE LA DOSE BOLUS	ÉCRAN
POMPE ALLUMÉE		• Pompe sur <b>ON</b>	
		• Administration de la dose bolus	
		• Pompe sur <b>ON</b>	
POMPE ALLUMÉE	 	• Durée de la perfusion	
		• Pompe sur <b>StoP</b>	
		• Extinction du signal sonore et clignotement de l'écran	
POMPE SUR OFF/StoP	 (5 sec)  (7 sec)  appuyer sans relâcher   / 	• Pompe sur <b>OFF</b> ou sur <b>StoP</b>	
		• Affichage du nombre de bolus administrés	
		• Affichage du nombre de perfusions	
		• Phase de sélection du niveau de verrouillage du clavier	
		• Sélection de verrouillage/déverrouillage du clavier	 
		• Pompe sur <b>OFF</b> ou sur <b>StoP</b>	   

# FrEE

	TOUCHES	PROGRAMMATION EN ÉTAT OFF	ÉCRAN
POMPE SUR OFF		• Programmation du débit F2 (de 0,00 à 5,00 - oFF - désactivé)	
		• Programmation du débit F3 (de 0,00 à 5,00 - oFF - désactivé)	
		• Programmation du volume partiel (de 1 à 50 ml) (voir tableau : PROGRAMMATION DU VOLUME PARTIEL)	
		• Pompe sur OFF	
		• Diminution/augmentation des paramètres précédents	
	TOUCHES	PROGRAMMATION DU VOLUME PARTIEL	ÉCRAN
POMPE SUR OFF		• Programmation du volume partiel	
		• Diminution/augmentation du volume partiel	
		• Positionnement du pousseur au volume partiel	
		• Pompe sur OFF	
	TOUCHES	MISE EN MARCHÉ/AMORÇAGE	ÉCRAN
POMPE SUR OFF		• Pompe sur OFF	
		• Fonction <i>amorçage</i>	
		• Distribution de la dose d'amorçage (1,5 ml max. totale)	
		• Mise en marche de la pompe	
		• Démarrage de la perfusion	
	• Sélection des débits		

# FrEE

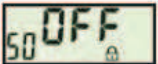	TOUCHES	RETOUR ANTICIPÉ	ÉCRAN
POMPE ALLUMÉE	 	• Pompe sur StoP	   
		• Pompe sur End	
		• Retour du pousseur	
		• Pompe sur OFF	
POMPE ALLUMÉE		• Pompe sur End	
		• Retour du pousseur	
		• Pompe sur OFF	
POMPE SUR OFF/stop - L1	       	• Pompe sur OFF	
		• Volume de dose bolus	
		• Intervalle entre les doses bolus	
		• Débit F1	
		• Débit F2	
		• Débit F3	
		• Volume partiel	
		• Pompe sur OFF	

**Distribué par:**

Pentaferte France SAS  
 3, rue des Entrepreneurs ZAC de l'Ambrésis 77270 Villeparisis  
 Tél: 01-64-67-08-63 Fax: 01-64-67-13-61  
 contact@pentaferte-france.com



**Fabriqué par:**

CANÈ S.p.A. Medical Technology  
 Via Cuornè 42/a 10098 Rivoli (TO) Italie  
 Tél. +39 011 9574872 - Fax +39 011 9598880  
 www.canepa.it E-mail : mailbox@canepa.it

DM classe II.b - CE 0476 CERMET - Ce Dispositif Médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Version 02-2013